

	MIROMED s.r.l. Viale De Gasperi 17 - 20045 Lainate (MI) - ITALY Magazzino: Viale De Gasperi 19/A - 20045 Lainate (MI) Tel. +39 02 93572150 - www.miromed.it - info@miromed.it	
	Plaque Test	
SCHEDA TECNICA		
COSMETICO – Regolamento (CE) n. 1223/2009.	Revisione n°	03
	Data	02/09/2020

1. CLASSIFICAZIONE REGOLATORIA

CPNP (reference number): 3368697

2. COMPOSIZIONE

Ingredienti: Aqua, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, C.I. 45410, C.I. 42090

3. CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DEL PRODOTTO

Aspetto	Liquido colorato
Colore	Blu/viola
Odore	Standard
Densità T= 25°C	1,00 g/l
pH	5,50 – 6,50

4. PROPRIETA'

MENTADENT PROFESSIONAL PLAQUE TEST è un liquido per rilevare la placca batterica dentale per uso professionale.

5. CONFEZIONAMENTO

1 flacone da 10 ml

6. APPLICAZIONE E MODALITA' D'IMPIEGO

Saturare la punta di un batuffolo di cotone o un applicatore con la soluzione e distribuirla sui denti. Effettuare un risciacquo con acqua per eliminare il prodotto in eccesso. Al termine dello sciacquo la placca è resa visibile:

- Placca dentale matura = colore blu
- Placca dentale recente = colore rosa

La colorazione può essere rimossa lavando e spazzolando i denti

7. MODALITA' DI CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

- Dopo l'uso richiudere la soluzione
- Conservare a temperatura ambiente

8. PAO

12 mesi.

9. AVVERTENZE E CONSIGLI DI PRUDENZA

- L'applicazione di MENTADENT PLAQUE TEST è controindicata in caso di allergia nota ad uno dei componenti.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini

MIROMED

Fabbricante: MIROMED s.r.l.

Viale De Gasperi 17 – 20045 Lainate (MI) - ITALY

Tel. +39 0293572150 - www.miromed.it - info@miromed.it

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI