

	 MIROMED GROUP S.a. Corso San Gottardo, 54A - 6830 Chiasso - CH Ph: +41 (0)91 960 58 48 info@miromedgroup.ch - www.miromedgroup.ch EC REP MIROMED S.R.L. Viale De Gasperi, 17 - 20045 Lainate (MI) - ITALY Ph: +39 0293572150 info@miromed.it - www.miromed.it	
		
Mentadent Professional RESILIENCE		
TECHNICAL DATA SHEET		
COSMETICO PROFESSIONALE REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici.	Rev. n°	01
	Date	29/02/2024

1. TRATTAMENTO POST IGIENE:

- Lucidatura
- Rimozione delle macchie
- Profilassi

2. COMPOSIZIONE:

Aqua, Silica, CI 17200, Glycerin, Propylene Glycol, Xylitol, CI 42090, Calcium Carbonate, Hydroxyapatite, Perlite, Phenoxyethanol, Sodium Dehydroacetate, Mentha Piperita Oil, Sodium Fluoride.

3. CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DEL PRODOTTO

Aspetto	Gel
Colore	Porpora
pH	7.0 – 8.5
Solubilità in/Miscibilità con acqua	Insolubile in acqua

4. PROPRIETÀ

Mentadent Professional RESILIENCE è un gel dentale a utilizzo professionale con effetto pulente, lucidante, brillante e desensibilizzante grazie ai minerali bio-compatibili presenti al suo interno.

Mentadent Professional RESILIENCE è indicato nel trattamento post igiene per la lucidatura, la rimozione delle macchie e la profilassi.

Il gel contiene Perlite, Idrossiapatite e Xilitolo che garantiscono una corretta profilassi, rimuovono le macchie e rendono i denti più brillanti.

5. APPLICAZIONE E MODALITA' D'IMPIEGO

- 1) Dopo aver effettuato una seduta di igiene sul paziente, posizionare l'apposito apribocca, e procedere con il trattamento di profilassi.
- 2) Estrudere il gel contenuto nella siringa Mentadent Professional RESILIENCE in un pozzetto.
- 3) Utilizzando l'apposita coppetta in gomma/spazzolino per profilassi dentale prelevare il gel da applicare sui denti.
- 4) Stendere il gel Mentadent Professional RESILIENCE su entrambe le arcate, **facendo ruotare la coppetta/spazzolino a velocità moderata.**
- 5) Una volta passato il prodotto sulla superficie dei denti, rimuovere i residui di gel aspirando con l'apposito aspirasaliva.

6. MODALITA' DI CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, scintille e fiamme.
Evitare la luce solare. Conservare a temperatura ambiente.
Tenere la siringa chiusa quando non utilizzata. Conservare nel contenitore originale.

7. PAO (Period After Opening)

12 mesi

8. AVVERTENZE E CONSIGLI DI PRUDENZA

Il prodotto non è classificato come materiale pericoloso.
Il prodotto non deve essere ingerito.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.