



**MIROMED GROUP s.a.**  
Corso San Gottardo, 54A - 6830 Chiasso - CH  
Ph: +41 (0)91 960 58 48  
info@miromedgroup.ch - www.miromedgroup.ch

**MIROMED S.R.L. licensee MENTADENT PROFESSIONAL**



**MIROMED S.R.L.**  
Viale De Gasperi, 17 - 20045 Lainate (MI) - ITALY  
Ph: +39 0293572150  
info@miromed.it - www.miromed.it



*Genius Pro*

**White Beauty Professional Genius Pro**

## **SCHEDA TECNICA**

Cosmetico per Uso Professionale

Rev n°

05

Date

23/04/2025

### **1. Composizione:**

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Base liquida</b> | Perossido di idrogeno.<br>Soluzione al 6% diluito in acqua distillata. |
| <b>Base anidra</b>  | Agenti gelificanti, nitrato di potassio, CI 42090.                     |

### **2. Proprietà Chimico Fisiche**

- Stato: Gel, dopo la miscelazione
- Odore: Caratteristico
- Colore: Blu opalescente
- pH: 5,00 – 6,50

### **3. Campo di utilizzo**

White Beauty Professional Genius Pro è un gel blu pronto all'uso per lo sbiancamento dentale professionale ultrarapido, costituito dalla miscelazione di una polvere e di perossido di idrogeno al 6% di concentrazione contenuti in due siringhe.

Collegare le due siringhe e miscelare il prodotto trasferendo tutto il contenuto da una siringa all'altra per 3-4 volte, in modo da ottenere un gel blu omogeneo.

White Beauty Professional Genius Pro è formulato per essere un trattamento sbiancante ultrarapido, non richiede l'uso di diga gengivale e può essere utilizzato con o senza luce LED.

### **4. Modalità di azione**

Il gel viene applicato sulla superficie buccale dell'elemento dentale per sviluppare la reazione chimica di ossidazione delle molecole cromogeniche. Grazie alla sua maggiore capacità di reazione, il perossido di idrogeno viene spesso utilizzato in associazione a lampade LED, che catalizzano ulteriormente il processo chimico dando risultati soddisfacenti in una sola seduta.

### **5. Modalità d'uso**

Eseguire la storia clinica del paziente. La valutazione dell'idoneità del paziente a sottoporsi a questo trattamento rimane sempre responsabilità del professionista.

Utilizzare la scheda per rilevare il colore dei denti del paziente prima del trattamento, o altri strumenti dedicati alla rilevazione del colore.

Indossare guanti protettivi. Posizionare l'apribocca protettivo sulla bocca del paziente. Riparare gli occhi del paziente con occhiali protettivi e applicare il gel sbiancante blu direttamente sui denti.

L'uso della lampada LED è facoltativo per accelerare il processo di sbiancamento dei denti e il suo utilizzo rimane a discrezione del professionista. Si ricorda che l'uso della lampada LED accelera il processo di sbiancamento dei denti.

Lasciare agire il prodotto sui denti per 10 minuti, aspirando nel frattempo la saliva del paziente.

Dopo dieci minuti rimuovere eventuali residui di prodotto utilizzando l'aspiratore di saliva, rimuovendo il tappo superiore per facilitare l'aspirazione.

Se il professionista lo ritiene opportuno si può effettuare una seconda applicazione.

Prendere la tonalità con la scheda per verificare i miglioramenti ottenuti.

#### **6. Controindicazioni**

Da non usare su persone di età inferiore ai 18 anni. Il prodotto non deve essere utilizzato in pazienti con allergie note ai componenti, in gravidanza o in allattamento, bambini, forti fumatori, pazienti che fanno largo uso di alcol, in presenza di denti con colletto esposto, in presenza di carie primarie e secondarie non trattate, in presenza di corone e ponti con fessure marginali.

Può verificarsi una sensibilizzazione temporanea dei denti; tali sintomi scompaiono solo al termine del trattamento o con l'interruzione dello stesso.

#### **7. Attenzione**

White Beauty Professional Genius Pro contiene il 6% di perossido di idrogeno che è irritante. Limitare il contatto personale non necessario, evitare il contatto con gli occhi e indossare adeguati dispositivi di protezione: si raccomanda l'uso di guanti e occhiali protettivi. In caso di contatto del gel con la pelle e le mucose sciacquare immediatamente le parti del corpo interessate con abbondante acqua. Se gli stati di irritazione persistono anche dopo diverse ore, consultare il medico.

#### **8. Conservazione**

Conservare il prodotto a temperatura ambiente, proteggendo la confezione dal calore e dall'esposizione diretta alla luce solare.

**INFORMAZIONI RISERVATE AI PROFESSIONISTI SANITARI E AGLI UTENTI PROFESSIONALI**