

|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                       |  <b>MIROMED GROUP s.a.</b><br>Corso San Gottardo, 54A - 6830 Chiasso - CH<br>Ph: +41 (0)91 960 58 48<br>info@miromedgroup.ch - www.miromedgroup.ch<br><br><div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">EC REP</div> <b>MIROMED S.R.L.</b><br>Viale De Gasperi, 17 - 20045 Lainate (MI) - ITALY<br>Ph: +39 0293572150<br>info@miromed.it - www.miromed.it |            |
|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| <b>White Beauty Professional TAILOR 10</b><br><b>White Beauty Professional TAILOR 16</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;"> <b>TECHNICAL DATA SHEET</b> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| <b>Cosmetico professionale</b>                                                                                         | Rev n°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00         |
|                                                                                                                        | Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05/05/2025 |

#### CLASSIFICAZIONE REGOLATORIA:

- COSMETICO PROFESSIONALE
- WHITE BEAUTY PROFESSIONAL TAILOR 10, - Numero di Riferimento CPNP: **5153418**
- WHITE BEAUTY PROFESSIONAL TAILOR 16, - Numero di Riferimento CPNP: **5154587**
- IL PRODOTTO RICHIEDE LA SUPERVISIONE DEL DENTISTA PER IL PRIMO UTILIZZO

Il Regolamento Europeo dei Cosmetici prescrive:

- Di non usare il prodotto su pazienti con età inferiore ai 18 anni
- Di commercializzare il prodotto esclusivamente alla classe odontoiatrica.
- Di non usare oltre 6 mesi dalla data di preparazione indicata sulla card consegnata dal professionista

#### PROPRIETA' E INDICAZIONI

White Beauty Professional TAILOR è uno sbiancante domiciliare professionale: la prima applicazione deve essere svolta sotto il controllo del professionista. Il prodotto viene preparato dal professionista (miscelando due siringhe) e inserito nel dispenser Tailor Airless che garantisce un'ottimale conservazione.

Applicare White Beauty Professional TAILOR all'interno della mascherina, dosando la giusta quantità di prodotto in base al tipo di dente e al tipo di mascherina utilizzata. Al termine del trattamento, sciacquare la bocca per eliminare eventuali residui di prodotto dai denti e pulire accuratamente la mascherina.

Le istruzioni sulla frequenza e la durata del trattamento devono essere fornite dal Professionista.

Il prodotto è disponibile in due varianti:

- White Beauty Professional **TAILOR 10** è un gel a base di perossido di carbammide al 10%. Il perossido di carbammide al 10% equivale al 3,6% di perossido di idrogeno.
- White Beauty Professional **TAILOR 16** è un gel a base di perossido di carbammide al 16%. Il perossido di carbammide al 16% equivale al 5,8% di perossido di idrogeno.

## **Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali**

Aspetto: Gel

Colore: Opalescente

Odore: Caratteristico pungente

pH : 4,7 – 6,0

## **COMPOSIZIONE**

Miscela delle sostanze sottoelencate con soluzione acquosa:

Carbamide peroxide (urea peroxide), Tetrasodium EDTA, Carbomer, Potassium nitrate, Potassium Sorbate, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Fruit Extract.

## **AVVERTENZE**

- Attenersi sempre alle istruzioni fornite dal dentista
- In caso di dubbi riguardanti l'uso appropriato del prodotto rivolgersi sempre al dentista.
- Controlli e pulizie dentali regolari sono sempre importanti per mantenere un sorriso sano.
- Le donne in gravidanza o che allattano al seno o i pazienti con gravi problemi di salute non devono sottoporsi a trattamenti di sbiancamento. Consultare il medico di riferimento prima di sottoporsi al trattamento sbiancante.
- I denti sono leggermente più scuri lungo il bordo gengivale e di solito rimangono tali anche dopo il trattamento.
- Corone, ponti, protesi e otturazioni in composito non reagiranno al trattamento sbiancante.
- Evitare il contatto del gel con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua. Nel caso in cui permangano stati di irritazione consultare il medico.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

## **CONSERVAZIONE:**

Conservare in un luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere. Tenere i contenitori chiusi quando non in uso. Conservare nel contenitore originale fornito dal produttore. Evitare l'esposizione alla luce solare.

## **SICUREZZA**

- Il prodotto non è classificato come materiale pericoloso.
- Consultare la nostra Scheda di Sicurezza per i dettagli sui vari aspetti relativi alla sicurezza.

INFORMAZIONI RISERVATE AI PROFESSIONISTI SANITARI E AGLI UTENTI PROFESSIONALI